

SAMATOR OXYPURE
COMPRESSED GAS OXYGEN



COMPRESSED GAS OXYGEN DENGAN REGULATOR OXYGEN MEDIS

Alat terapi Samator Oxypure Compressed Gas Oxygen memiliki kandungan 99.5% gas oxygen murni di dalam cylinder dari materi aluminium dan baja untuk memenuhi kebutuhan oxygen anda sehari-hari dengan harga yang terjangkau. Melalui proses produksi yang ditangani langsung oleh para ahli berpengalaman dan mesin-mesin termutakhir, kualitas dan kemurnian oxygen dalam setiap unit Samator Oxypure Compressed Gas Oxygen kami jamin sebagai yang terbaik di Indonesia. Tersedia dalam empat ukuran: **1 m³, 1.5m³, 2 m³, dan 6 m³**. Setiap unit dilengkapi dengan regulator oxygen medis.

PERINGATAN



Cylinder bertekanan.



Meningkatkan resiko api: oxygen membantu pembakaran.



Dilarang merokok di dekat dan ketika menggunakan alat.



Jangan letakkan alat di dekat api.



Jangan gunakan pelumas pada alat maupun aksesorisnya.

CARA PENGGUNAAN

1. Isi gelas humidifier dengan air suling / aquades sampai level yang ditentukan.
2. Pasangkan regulator oxygen medis pada cylinder valve, eratkan dengan kunci inggris.
3. Putar cylinder valve handwheel **berlawanan arah jarum jam** ⚙ untuk mengalirkan oxygen.
4. Jarum pressure gauge berfungsi menunjukkan tekanan oxygen yang tersisa di dalam cylinder.
5. Untuk mulai menggunakan, buka flow meter valve **berlawanan arah jarum jam** ⚙, bola penunjuk akan bergerak sesuai aliran yang dibutuhkan. Untuk pemakaian harap disesuaikan dengan kebutuhan.
6. Pasang selang masker / cannula pada humidifier connector dan bernafaslah seperti biasa.
7. Selesai penggunaan, tutup cylinder valve **searah jarum jam** ⚙ sampai rapat.

CARA MELEPAS REGULATOR


1. Tutup cylinder valve **searah jarum jam** ⚙ dan buang sisa tekanan regulator dengan membuka flow meter valve **berlawanan arah jarum jam** ⚙ sampai jarum pressure gauge menunjukkan angka 0 (nol).
2. Gunakan kunci inggris untuk melepas regulator dari cylinder valve.
3. Hubungi call center untuk pengisian ulang gas Oxygen.



SCAN BARCODE
untuk menonton video
cara penggunaan



PERBANDINGAN TINGGI TABUNG SAMATOR OXYPURE

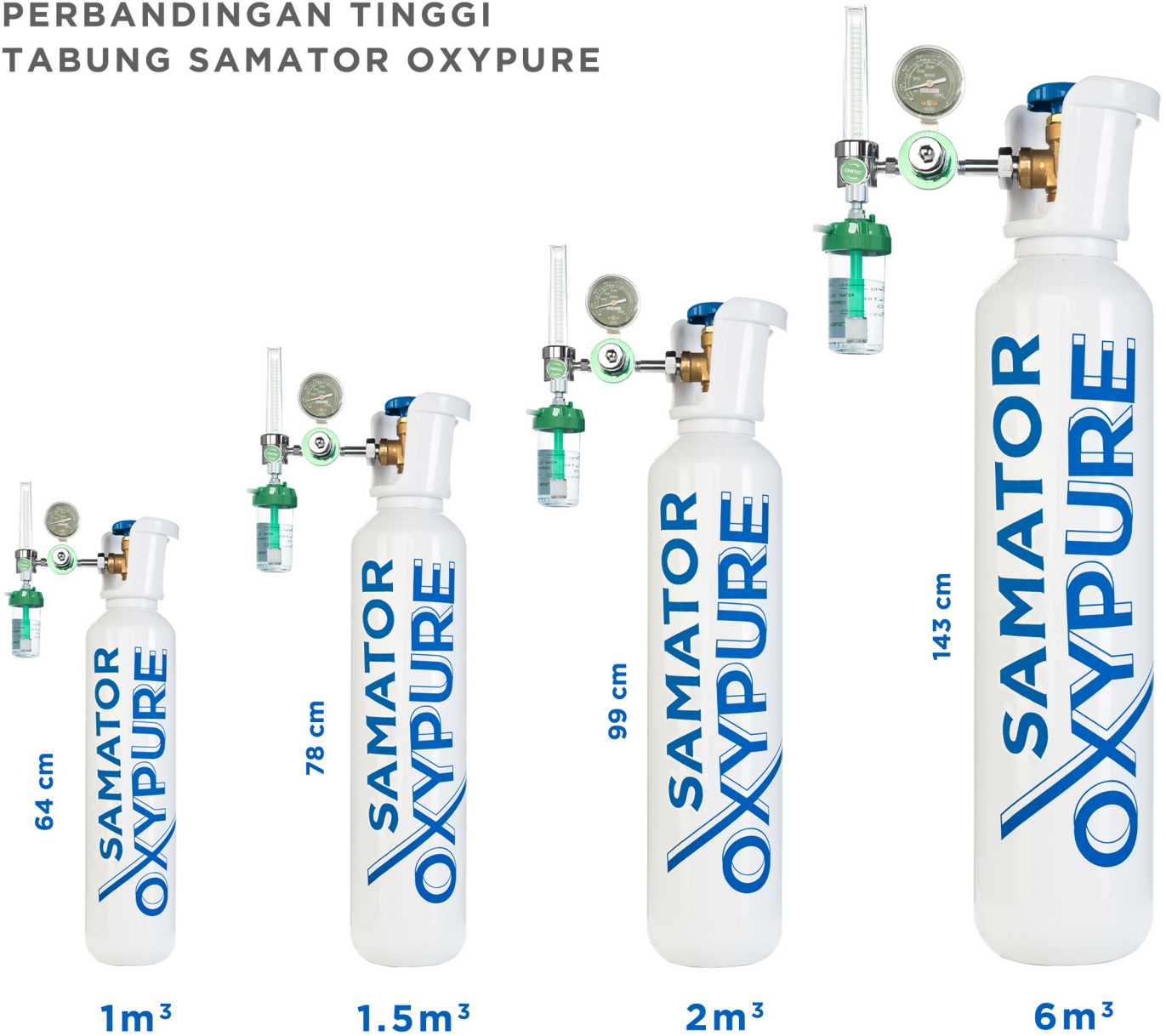

TINGKATKAN KUALITAS
HIDUP ANDA, CUKUP
DENGAN TARIKAN
NAPAS.

MANFAAT UNTUK KESEHATAN

Tubuh manusia membutuhkan oxygen dengan nilai persentase hingga lebih dari 90 persen. Apabila kadar oxygen di dalam darah berkurang, kita akan mengalami kesulitan bernafas dan dapat menimbulkan gangguan kesehatan yang tidak diinginkan jika keadaan tersebut berlangsung dalam waktu yang lama.

Menghirup oxygen murni sangat membantu tubuh untuk memperbaiki metabolisme dan sel-sel tubuh yang rusak, sehingga tak jarang dokter menganjurkan terapi oxygen untuk pasien yang menderita penyakit paru-paru kronis, diabetes, gagal ginjal, stroke, dan beragam penyakit-penyakit lainnya.

Selain membantu tubuh untuk cepat pulih kembali, mengonsumsi oxygen murni dari Samator Oxypure juga dapat meningkatkan kualitas hidup sehari-hari, terutama bagi anda yang tinggal di daerah perkotaan yang berpolusi. Anda menjadi lebih produktif di kantor, lebih berenergi ketika berolahraga, dan bahkan lebih cantik dan awet muda.



PT SAMATOR

SURABAYA

Jl. Kedung Baruk No. 25-28
Surabaya, 60298
Telp: +6231 9900 3821

JAKARTA

Gedung UGM Samator
Pendidikan Tower A, Lt. 5-6
Jl. Dr. Sahardjo No. 83
Manggarai-Tebet
Jakarta Selatan 12850
Telp: +6221 2956 3093

Untuk pemesanan hubungi call center kami:

087 766 90 8000 (Surabaya)

085 859 80 8000 (Jakarta)